



Strikket brystprotese



Originalmønster: www.knittedknockers.org

Øversettelse: Denise Samson

Veilende pinner: 4 strømpenner og liten rundpinne nr. 3,5

Strikkefasthet: ca. 21 m på 10 cm

Garn: Bruk et mykt, vaskbart garn i 100 % bomull, eventuelt blandingsgarn med 50 % bomull og 50 % viskose/bambus, f.eks. Drops Safran, Drops Muscat, Viking Bamboo, Catania fra Schachenmayr


Tilbehør: Vaskbar fyllvatt, kan blant annet kjøpes hos Stoff & Stil, stoffogstil.no
3 maskemarkører

LES HELE OPPSKRIFTEN FØR DU BEGYNNER Å STRIKKE

Det er viktig at garnet er mykt siden det skal bæres mot sensitiv hud. Garnet må kunne puste og være like mykt etter vask. Skal protesen brukes ved svømming, kan du strikke med akrylgarn. De fleste ønsker seg proteser i nøytrale farger. Men hvis du har for lite når du har strikket ferdig overdelen, kan du bruke rester i andre farger til underdelen. Ikke stress for mye med med strikkefastheten. Det viktigste er å sørge for at alle parene har samme størrelse (samme antall masker). Cirka 75 % av forespørslene gjelder størrelse B og C, resten i A, D og DD/E-cup.

Hvis du velger å strikke på strømpenner er de første omgangene litt vanskelige, men så går det lekende lett. Vær oppmerksom på at du feller forskjellig på 1. og 2. omgang på underdelen av protesen. Da blir underdelen flat.

På knittedknockers.org finner du instruksjonsvideo og tips på engelsk.

Tusen takk for at du bidrar 

Forkortelser

ggr = ganger

m = maske(r)

omg = omgang

p = pinner

r = rett

sm = sammen

øk 1 m = Strikk 1 m i fremre og 1 m i bakre maskeledd i samme m

Bytt til liten rundpinne når det blir mange masker på strømpepinnene. Eventuelt kan du bruke magic loop på hele arbeidet. Sett en maskemarkør i hver av de tre overgangene, så blir det enklere å se hvor du skal øke på overdelen og felle på underdelen.

Oppskrift overdel

Antall masker

Legg opp 3 m	Hvis du vil ha «brystvorte» begynner du med 4 pinner i-cord	3 m
Øk 1 m i hver m		6 m
Fordel m på 3 strømpepinner		6 m/ 2 m på hver pinne
1. omg	Øk 1 m i annenhver m	9 m/3 m på hver pinne
2. omg	Øk 1 m i slutten på hver p	12 m/4 m på hver pinne
For A-cup	Gjenta 2. omg i alt 24 ggr eller til arb måler 13 cm i diameter	84 m/28 m på hver pinne
For B-cup	Gjenta 2. omg i alt 26 ggr eller til arb måler 14 cm i diameter	90 m/30 m på hver pinne
For C-cup	Gjenta 2. omg i alt 30 ggr eller til arb måler 15,5 cm i diameter	102 m/34 m på hver pinne
For D-cup	Gjenta 2. omg i alt 32 ggr eller til arb måler 17 cm i diameter	108 m/36 m på hver pinne
For DD/E-cup	Gjenta 2. omg i alt 34 ggr eller til arb måler 18 cm i diameter	114 m/38 m på hver pinne

Strikk 2 omg vrangt for å definere kanten før du strikker underdelen, og fest tråden til «brystvorten» på vrangen før du strikker videre.

Oppskrift underdel

1. omg	Strikk til du har 2 m igjen på hver p, strikk 2 r sm
2. omg	På hver pinne: Ta 1 m løst av p, strikk 1 r, løft den løse m over, strikk til du har 2 m igjen, strikk 2 r sm

Gjenta disse to omg til du har 12 m igjen, 4 m på hver pinne. Klipp av tråden og dra den gjennom de resterende maskene. La det være igjen en åpning slik at du får fylt protesen med vatt. Sy sammen åpningen.

Har du spørsmål vedrørende oppskriften, vennligst ta kontakt: denise@andreboller.no